

## Rekonditionering av Lympha Press Optimal Plus inklusive manschetter

Efter mottagandet av Lympha Pressutrustningen, skall det säkerställas att:

1. Alla slangar är anslutna till manschetten
2. Samtliga luftslangar från manschett till pump är intakta
3. Pumpen ser oskadad ut
4. Kompressorn kan slås på och av med strömbrytarknappen på pumpens sida
5. Manschetten kan anslutas till kompressionspumpen
6. Valt program på kompressionspumpen fungerar när manschetten är kopplad till kompressionspumpen
7. Manschetten fylls från luftkammare nr. 1 perifert vid hand/eller fot på respektive manschett
8. Att tid och tryck kan ändras under tiden valt program på kompressionspumpen pågår
9. Inget programval kan ändras under tiden kompressionspumpen är i gång
10. Manschetten töms på luft när pausknappen trycks in
11. När Lympha Press applikationen er aktiv går det at ansluta till kompressionspumpen via Bluetooth.