

Phlebo Press® DVT

Forebygger dyb venetrombose

Phlebo Press DVT 760D



Phlebo Press DVT 760D:

Phlebo Press 760D er en pneumatisk DVT kompressions-pumpe, som stimulerer blodcirkulationen og øger det venøse tilbageløb fra benene i retning mod hjertet. Anvendelsen er komfortabel og smertefri.

Phlebo Press 760D anvendes til forebyggelse af dyb venetrombose (DVT) til f.eks. patienter, som er immobile under operation eller indlæggelse. Den anvendes også til andre tilstande, som er beskrevet under indikationer.

Ved anvendelse af 4-kammer manchetter fyldes de 4 luftkamre sekventielt i perifer til central retning. Når kamrene er fyldt med luft, tømmes de simultant, hvorefter der er en pause uden kompression. En kompressionscyklus bestående af inflation, deflation og pause varer 60 sekunder, derefter gentages processen.

Indikationer:

- Forebyggelse af dyb venetrombose (DVT) hos patienter i risikogruppen
- Reduktion af smerter og hævelse efter operationer eller skader
- Forøgelse af venøs cirkulation
- Forebyggelse af venøs stase
- Supplement til heling af skinnebessår
- Reduktion af ødem
- Behandling af dyb venøs insufficiens

Kontraindikationer:

- Hjertesvigt, lungeødem eller når forøget venøs eller lymfatisk tilbageløb er uhensigtsmæssigt
- Alvorlig arteriosklerose eller andre iskæmiske vaskulære sygdomme
- Kendt eller mistænkt dyb venetrombose (DVT), tromboflebitis, eller veneligering
- Aktiv infektion
- Koldbrand
- Hudtransplantation af nyre dato
- Ekstrem deformitet af ben

Forsigtighed:

- Udvis forsigtighed for patienter, som har nedsat følesans.
- Hvis patienten oplever smerte, prikken eller følelsesløshed i det behandlede område, stop kompressionspumpen, fjern manchetten og kontakt den tilsynsførende læge.

Phlebo Press DVT 760D

Egenskaber ved Phlebo Press DVT 760D:

- Lille og kompakt DVT pumpe, med alarm ved fejlfunktion
- Giver intermitterende sekventiel kompression i begge ben simultant
- Kan anvendes med 1 eller 2 manchetter
- Indbygget genopladeligt batteri, som kan oplades imens pumpen anvendes
- Kan hænge på fodgærde eller operationsleje vha. de fastmonterede kroge bag på pumpen
- Slangebundterne kan genanvendes, hvilket minimerer mængden af affald



Varenr.	Vægt (kg)	Størrelse (cm)	Tryk mmHg
024201	1	22 x 20 x 9,5	45

Specifikationer

Model	Phlebo Press® DVT 760D
Kompressionscyklus	Sekventiel, 60 sekunder/cyklus
Strømforsyning	100-240 V 50-60 Hz
Batteri	Fuld opladning tager 8 timer. Anvendelsestiden 10 - 20 timer, afhængig af manchettype og størrelse
Indbygget alarm	Kontinuerlig beep lyd og orange lampe lyser
Leveres med	2 slangebundter (1,8 m), 1 blindprop og 1 strømforsyning

Tilbehør til Phlebo Press DVT 760D

Varenr.	Navn
024221	Phlebo Press DVT Slangebundt/1,8 m til 024203, 024204 og 024205
024219	Phlebo Press DVT Blindprop
024220	Phlebo Press DVT Strømforsyning



Slangebundt



Blindprop



Strømforsyning

Personlige manchetter - hygiejniske og fleksible:

- Manchetterne er komfortable, åndbare og lette at anvende
- Manchetterne lukkes med velcro, så de kan tilpasses ben med stor forskel på volumen
- Manchetterne kan anvendes gentagne gange men kun af samme bruger, hvilket minimerer smitterisiko
- Manchetterne har 4 overlappende luftkamre, som sikrer sekventiel kompression ved hver eneste inflation
- Manchetterne kan drejes efter behov, og brugeren kan vælge, om slangerne skal komme ud på indersiden eller ydersiden af benene
- Manchetterne leveres parvis og bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald



Varenr.	Navn	Manchetdimensioner (cm)	
		under knæ	ved ankel
024203	Phlebo Press DVT Lægmanchet/4 kamre/personlig/small	29-45	20-30
024204	Phlebo Press DVT Lægmanchet/4 kamre/personlig/medium	34-60	24-36
024205	Phlebo Press DVT Lægmanchet/4 kamre/personlig/Large	46-64	34-47

Hvorfor vælge Phlebo Press DVT?

- Phlebo Press DVT har været anvendt på verdensplan i 17 år, og effekten er medicinsk dokumenteret.
- Sortimentet udvikles og forbedres løbende.
- Phlebo Press DVT er CE-mærket medicinsk udstyr.



Hvorfor vælge Apodan som leverandør af kompressionspumper?

- Apodan er certificeret efter den medicinske udstyrsstandard ISO 13485, og har siden 1962 været en etableret dansk leverandør til sundhedsvæsenet.
- Support fra uddannede sygeplejersker med mange års erfaring indenfor kompression.
- Kundeservice/teknisk support alle hverdage - mandag til torsdag kl. 8-16 og fredage kl. 8-15.
- Varelager i Danmark sikrer hurtig leverance.



Gitte Yding
Produktspecialist/
sygeplejerske
gya@apodan.dk



Vivi-Ann Mark
Lymfødeterapeut/
sagsbehandler
vm@apodan.dk