

# ApoWIPE®

## til desinfektion af vaskulære katetre

### Reducér infektioner

*ApoWIPE Ethanol 80% er velegnet til desinfektion af injektionsporte, hætter og diverse former for forbindelselementer, samt lokal huddesinfektion.*


Den desinficerende klud er **individuet pakked** for at sikre dens renhed i enhver situation.

Pakkens størrelse er også designet så kluden kan tages sterilt ud af pakken.

**Størrelsen** af kluden er designet så kluden kan håndteres hygienisk og berøring af det evt. inficerede område kan undgås.

**Kludens kraftige materiale** sikrer effektiv mekanisk rengøring.

**Kludens tykkelse** sikrer passende fugt og dermed opretholdes ethanol niveauet på 80% under hele proceduren.

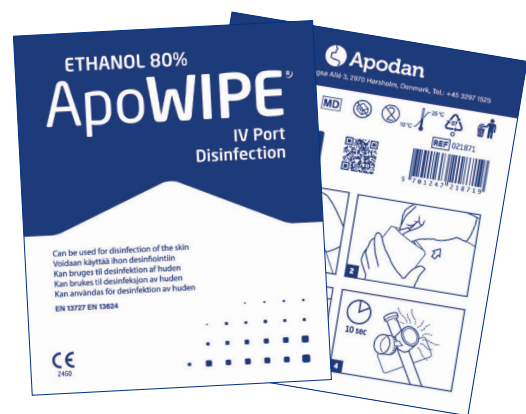

**STERILE R**


Ved brug af ApoWIPE desinfektionsklud kan den aseptiske håndtering af vaskulære katetre fremmes.

Med bedre aseptik kan en række fordele opnås:


- færre infektioner
- færre omkostninger
- forbedret patientsikkerhed

Vare nr.	Varenavn	Antal individuelt pakkede servietter pr. karton
021871	ApoWIPE IV Port Disinfection	800

# ApoWIPE desinfektionsklud til desinfektion af vaskulære katetre

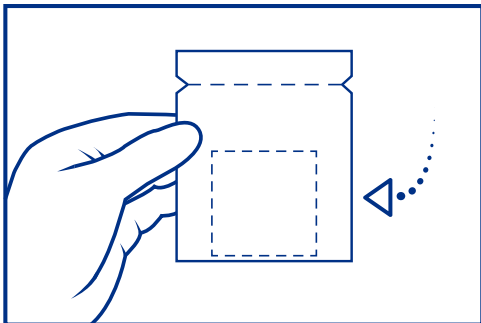

Kluden er placeret i bunden af pakken, så den forbliver så ren som mulig, når pakken åbnes.

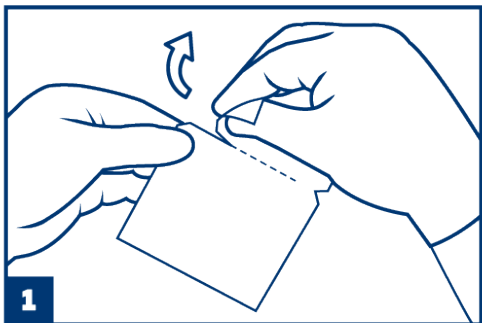


1. Åben pakken forsigtigt, som vist på billedet så kluden forbliver uberørt.



2. Tag kluden ud af pakken.



3. Rengør injektionsporten ved at tørre grundigt med kluden i 15 sekunder efter "Scrub the Hub" princippet.

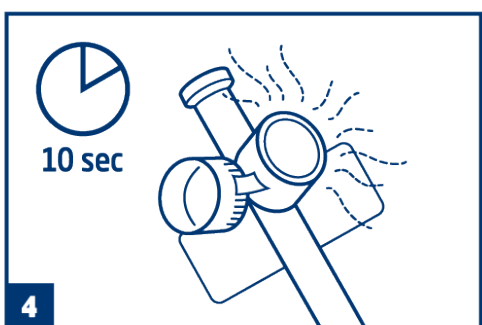

4. Lad injektionsporten tørre i 10 sekunder.