

## Brugsanvisning Thermolader vare.nr. 04-013

### Oplysning om sikkerhed



Dette apparat er CE-mærket i henhold til Husholdsdirektivet og må ikke opstilles i patientmiljø (f.eks. på en sengestue)

#### Læs brugsanvisningen igennem inden produktet tages i brug

- Tilslut kun apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Udsæt ikke dig selv for risikoen for at få elektrisk stød; Nedsenk ikke ledning, stik eller stikdåse i vand eller anden væske.
- **Tag apparatets stik ud af stikkontakten når den ikke er i brug samt før den rengøres.** Træk aldrig i ledningen når stikket skal tages ud; Tag i stedet fat i selve stikket og træk. Lad maskinen køle af før stikket tages ud og inden apparatet evt. stilles væk efter brug.
- Maskinen må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis udstyrets funktionalitet er i udu eller hvis maskinen er blevet beskadiget på nogen måde. Service skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Anvend ikke andet tilbehør end dem der leveres med maskinen, da dette kan forårsage en evt. ulykke.
- Ved uforsigtighed, kan du brænde dig selv på opvarmede dele, varmt vand eller damp
- Må ikke anvendes udendørs; Produktet er beregnet til indendørs brug.
- Stil ikke produktet på eller i nærheden af en ovn eller et komfur, der er i brug eller stadig er varmt.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bord eller køkkenbordet, og lad den ikke komme i kontakt med varme overflader.
- Vær forsigtig, og åbn låget væk fra dig selv, når du tager låget af. Lad kondensvand fra låget dryppe ned i apparatet for at undgå skoldning. Vær meget forsigtig, hvis maskinen skal flyttes, mens den indeholder varmt vand.
- Undlad at stille apparatet i nærheden af eller under genstande, der kan tage skade af damp, såsom vægge og skabe, da den producerer store mængder damp. Ræk ikke ind over produktet under brug.
- Du kan ikke bruge Thermoopladerens dele i en mikrobølgeovn eller andet køkkenudstyr / varme overflader.
- Brug altid grydelapper eller lign., når du rører ved apparatets varme dele eller hvis låget skal løftes under brug.
- Opladningstiden varierer lidt afhængigt af mængden, størrelse og placering i beholderen.
- En vis mængde vand vil forblive i beholderen, efter at maskinen er slukket; dette er normalt

#### Rengøring og vedligeholdelse

- **ADVARSEL:** Lad Thermoopladeren køle helt af inden rengøring. Fjern ledningen fra stikket.
- Sæt skål og låg i varmt sæbevand. Sørg for, at alle dele er rene og tørre, inden apparatet stilles væk.
- Vandbeholderen kan rengøres med varmt vand og opvaskemiddel uden slibemiddel. Soklel og ledning må kun aftørres med en fugtig klud..
- Selve apparatet må aldrig komme / dyppes ned i vand (eller andre væsker) eller skylles under vandhanen.
- Ved daglig rengøring anbefales det blot at anvende vand og en tør klud. Ved behov kan Virkon anvendes til desinfektion.

**Må ikke rengøres i opvaskemaskine!**

## Auto-sluk

Apparatet slukker automatisk, når den indstillede tid er gået. Dog anbefales det, at tage stikket ud af kontakten efter anvendelse.

## Sikring mod tærkogning

Apparatet er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod tærkogning. Tærkogningssikringen slukker automatisk apparatet, hvis det tændes, når der ikke er vand i vandbeholderen, eller hvis apparatet løber tør for vand under brug. Lad apparatet køle af i 10 minutter, før du tager den i brug igen.

## Afkalkning

Når apparatet har været brugt ca. 30 gange, kan det være nødvendigt med en afkalkning

### Sådan fjerner kalkaflejringer:

1. Fyld vandbeholderen med vand og 1/10 eddike eller afkalkningsmiddel op til max mærket. Ingen andre kemikalier eller rengøringsmidler må anvendes.
2. Sæt stikket i stikkontakten. Indstil timeren på 30 minutter og lad den dampe. Træk stikket ud af stikkontakten. Hæld derefter væsken væk.
3. Skyl vandbeholderen flere gange med koldt vand.

## Garanti og service

Hvis du har brug for service eller information, kan du kontakte Apodan A/S på 32 97 15 25.

## Sådan bruges apparatet

1. Stil apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.

Fyld vandbeholderen med vand fra vandhanen op til MAX-markeringen, se figur 1. Der må kun hældes vand i beholderen.



Figur 1

2. Placer den sorte drypbakke (figur 2) oven på basen med vand. Placer puderne, som skal varmes, i den hvide skål (figur 2), og læg derefter låget ovenpå. Sørg for at låget er monteret i rillerne. (puderne skal være hårde og have normal stuetemperatur før genopladningen starter)



Figur 2

3. Sæt låget på dampskålen, sørg for at låget er korrekt monteret ind i rillerne, som vist nedenfor i figur 3.



**Figur 3**

4. Sæt stikket i stikkontakten. Med timeren vælger du den ønskede ”ladetid/dampning”, normalt omkring ca 30-45 minutter, beroende på mængden af varmpuder. Så tændes lampen og efter ca 30 sekunder starter dampningen.
5. Når tiden er gået, lyder en klokken, lampen slukkes og maskinen slår automatisk strømmen fra. Træk stikket ud af kontakten når du er færdig med at dampe varmpuderne. Lad varmpuderne køle af i skålen.
6. Fjern varmpuderne og tøm vandet ud af skålen, tør den med køkkenrulle og sæt den væk. Lad varmpuderne køle af i normal stuetemperatur.

Hvis dampningen var utilstrækkeligt, vil varmpuderne krystallisere af sig selv. Prøv da igen at dampe dem, men øg tiden med et par minutter. (Ved omkogning skal der fyldes på med mere frisk vand).

For at lette genopladningen på samme tid af flere store og / eller mange mindre varmpuder, vedlægges en ekstra skål, som kan placeres oven på den almindelige skål. Man kan derefter genoplade flere varmpuder i hver skål.

Husk at folde den store pude (19x29cm) efter brug, mens den stadig er blød, hvilket gør at den nemmere passer ned i skålen.

Hvis du oplader mange varmpuder samtidig, kan opladningstiden muligvis øges med ca. 10-15 minutter

### TEKNISK SPECIFIKATION

Spænding: 220V-240V, 50-60Hz

Strøm: 715-850 watt.

CE mærket i henhold til

89/336/EEG

Made in China

GTIN: 7391133001204

Når produktet er brugt op, kan det ikke bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald. Bortskaffelse kan ske på den lokale genbrugsstation.



2019-02