


Curea P1 Drain®

Superabsorberende drænbandage

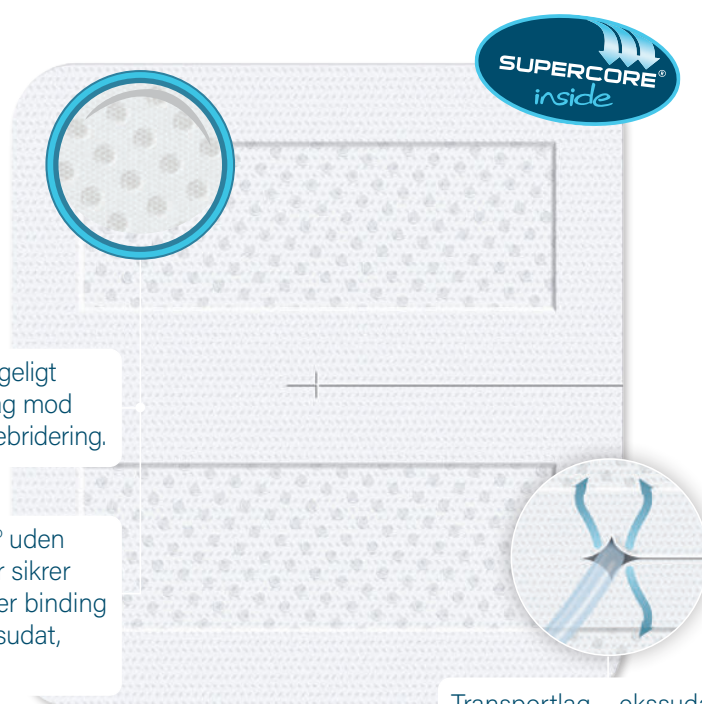

Et meget gennemtrængeligt nonwoven sårkontaktlag mod såret sikrer skånsom debridering.

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder ekssudat, bakterier og blod.

Transportlag – ekssudat ledes hurtigt til den sugende midte. Absorberer fra begge sider.

Curea P1 Drain - funktion & fordele:

- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder ekssudat – forlænger skifteinterval.
- Sårkontaktlag på begge sider – kan ikke vendes forkert.
- Renser skånsomt såret for bakterier og debris.
- Dokumenteret binding af alle typer ekssudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Udviklet med slids – transporterer effektivt ekssudat videre til den sugende midte - reduceret risiko for maceration af hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt - reducerer risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekraft.

Curea P1 Drain - indikationer og anvendelse:

- Anvendes til væskehåndtering ved sivende drænsteder, diverse sonder, suprapubis katetre etc, hvor huden skal beskyttes og genopbygges.
- Appliceres rundt om dræn, sonde, kateter etc.
- Passer til CH 9-24.
- Har et blødt sårkontaktlag på begge sider, og kan således appliceres på begge sider.
- Fikseres med passende fiksering.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.



Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse på sugende midte	Antal pr. æske
P1-100100D-25	Curea P1 Drain	12 x 12 cm	2 x (3,5 x 9 cm)	25

Steril og enkeltpakket

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:
Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk