

epicite^{hydro}

HYDROAKTIV BRANDSÅRSBANDAGE



HURTIGERE HELING • HØJ PATIENTKOMFORT

epicite^{hydro}

Unik konstruktion & funktion

Epicite^{hydro} er en hydroaktiv sårbandage af bioteknologisk organisk cellulose. Den ultrafine fiberstruktur sikrer et ekstremt højt vandindhold, således består epicite^{hydro} af >95% isotonisk NaCl og har en pH-værdi på 7.

Den unikke og stærke cellulosestruktur understøtter en afbalanceret rehydrering af vævet ved kontinuerlig afgivelse af fugt til sår/hudområde.

Dokumenteret hud- og vævsvenlig. Ingen kendte bivirkninger.

Smertelindrende ▪ beskyttende ▪ helende

Straks efter applicering sikrer fordampning fra bandagen en kølende og smertelindrende effekt.

Fugten fra bandagen diffunderer ned i dybereliggende væv af sår/skade, således reduceres mikroødem, stase og inflammation, og heling fremmes.

Foruden at tilføre fugt har bandagen også absorptionsevne ift håndtering af sårekssudat. Herved sikres et optimalt fugtigt sårmiljø, hvilket ligeledes bidrager til hurtigere heling.

Den beskyttende barriere, som epicite^{hydro} skaber, hindrer udefrakommende kontaminering og reducerer infektionsrisiko.

Stærk ▪ fleksibel ▪ enkel i brug

Bandagen former sig efter konturerne og er derfor også velegnet til applicering på svært bandagerbare steder: ansigt, ører, fingre, hænder og genitalier.

Hæfter ikke til såret og nydannet væv gror ikke ind i bandagen.

Epicite^{hydro} kan klippes til efter behov.

Bandagen er semitransparent, hvilket tillader sårinspektion uden at fjerne bandagen. Epicite^{hydro} fjernes atraumatisk og smertefrit i fugtig tilstand.

Kan holdes fugtig ved kontinuerlig tilførelse/spray af NaCl.

Når epicite^{hydro} tørrer ud, dannes en beskyttende skorpe som klippes/fjernes gradvis i takt med epitelisering.

Ved behov kan epicite^{hydro} kombineres med flydende antiseptika.


Applikationsguide

Åben den sterile indpakning, tag epicite^{hydro} ud og fjern den beskyttende folie fra begge sider af produktet.


Epicite^{hydro} kan ikke vendes forkert.




1
Debrider og soigner.
Sikr hæmostase.
Vurder sår dybden.

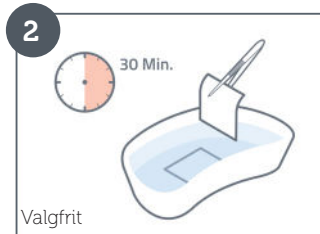


2
Epicite kan kombineres med antiseptisk opløsning ved iblødlægning 30 min. før applicering.

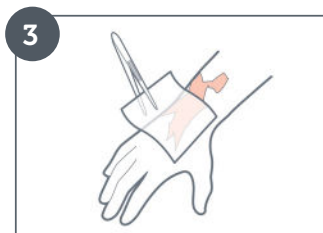


3
Applcicer epicite med min. 1-2 cm overlap på intakt hud.

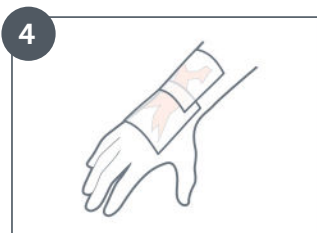

4
Ved større sår appliceres flere epicite bandager, da med overlap på min. 2 cm.

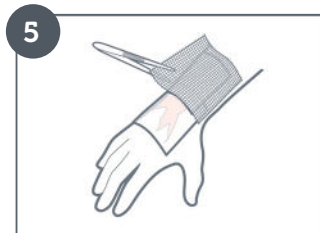


5
Dæk epicite med 1 lag steril paraffin gaze.

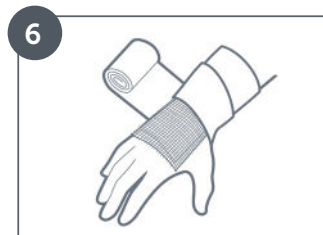

6
Efter behov applicer absorberende sekundær bandage og åndbar fiksering/evt. fikseringsbind.



7
Epicite klippes til i takt med, at den løsnes fra kanterne som følge af epitelisering.

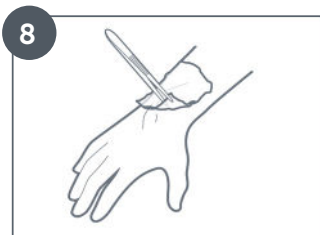

8
Det løsnede materiale fjernes atraumatisk ved sårtilsyn, indtil epicite afstødes som en naturlig sårskorpe.

Dansk instruks for ansigtsforbrændinger

Læs venligst gældende instruks ved Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet.



Akut behandling

Anvendes som 1. behandling pga. den kølende, fugtgivende effekt, hvor det skadede område dækkes af epicite^{hydro} uden sekundær forbindelse.

Kan genfugtes med NaCl, mens den forbliver på patienten.

Vedvarende hydrering reducerer skadens omfang.

Initial behandling

Følg applikationsguiden.

- Applicér epicite^{hydro} og lad bandagen være urørt i 24-48 timer.
- Epicite^{hydro} kan lades utildækket afhængig af sekretionsgrad samt behandlingsregime.
- Ved ønske om at bibeholde fugtigt miljø dækkes epicite^{hydro} med steril paraffin gaze, samt steril absorberende yderforbinding og åndbar fiksering. Efter de første døgn kan den absorberende bandage fjernes, mens laget af paraffin gaze forbliver på epicite^{hydro}.
- Efter initial behandling tilrettelægges behandlingen individuelt, afhængig af skadens omfang/dybde.

Ved kraftigt væskende forbrændinger, anbefales det at skifte epicite^{hydro} hver 2. til 3. dag, indtil bandagen kan tørre ud i takt med epitelisering.

- Rehydrer epicite for let og atraumatisk fjernelse
- Applicer ny epicite efter vurdering
- Tilse herefter bandagen hver 2.-3. dag.



Epicite^{hydro} bør skiftes ved observation af:

- Infektionstegn
- Lugt og/eller ændring af bandagens farve til mørk gul/grønlig
- Stagnerende healing

Læs i øvrigt Instruksen i pakken, før du anvender epicite^{hydro}.



Epicite^{hydro}

- Ideel hydro-balance
- Blød, formbar og fleksibel
- Beskyttende barriere
- Hud- og vævsvenlig
- Atraumatisk fjernelse
- Fremmer healing
- Lindrer smerter
- Reducerer infektionsrisiko
- Minimerer arddannelse
- Høj patientkomfort



Epicite^{hydro} indikationer:

Skoldning og
1. grads
forbrænding

2. grads
overfladisk og
dyb forbrænding





Vare nr.	Størrelse	Antal/æske
800003-M02B	10 x 10	10 stk
800003-M06B	15 x 20	10 stk
800003-M09A	20 x 20	5 stk
800003-M010A	Facemask	5 stk

Enkeltpakket og steril.
 Holdbarhed 3 år efter produktionsdato.
 Opbevares ved 5-30°C.



*Udnævnt til Wound Care Product of the Year 2022
 i kategorien Life Sciences af Global Health & Pharma Magazine*



QRSKIN GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 15
 D-97076 Würzburg
 Phone +49 931 7809 9640
 Info@QRSkin.com
 www.qrskin.com
 www.epicite-hydro.com



Apodan A/S
 Lyngsø Alle 3
 2970 Hørsholm
 Tel.: 3297 1525
 info@apodan.dk
 www.apodan.dk



Designed, developed
 and made in Germany.



Certified according
 to ISO 13485 and
 MDD 93/42/EEC