

Lympha Press Mini Press

Lympha Press Mini Press

Lympha Press Mini Press er en robust, pålidelig, effektiv, dynamisk og let betjenelig multikammer kompressionspumpe.

Den kan anvendes med alle multikammermanchetter bortset fra Lympha Pod.

- Justerbart tryk
- Ens tryk i alle luftkamre
- Justerbar anvendelsestid

Program

- Sequential



Varenr.	HMI Nr.	Vægt (kg)	Størrelse (cm)	Tryk mmHg
022105	130293	2,9	19x 34 x 24	20-80

Indikationer:

- Primær lymfødem
- Sekundær lymfødem
- Lipødem
- Venøs insufficiens
- Varicer
- Postoperativ venøs ligatur eller stripping
- Kronisk ødem af venøs oprindelse
- Posttraumatisk ødem
- Lymfatisk filariasis
- Ulcus cruris
- Optimering af sårheling

Kontraindikationer:

- Kendt eller mistænkt dyb venetrombose (DVT) eller tromboflebit
- Under en inflammatorisk flebitisk proces
- Akut infektion i den berørte ekstremitet
- Dekompenseret hjertesvigt
- Alvorlig arteriosklerose eller andre iskæmiske vaskulære sygdomme
- Enhver omstændighed, hvor øget venøs og lymfatisk tilbageløb er uønsket

Lympha Press Mini Press

Forsigtighed:

Pga. bevægelse af væsker i kroppen under brug af systemet skal der udvises forsigtighed ved anvendelse på patienter med hjertesygdom. Et højt tryk anbefales ikke for personer, som har perifer okklusiv sygdom. Maveregionen bør ikke komprimeres under graviditet.

Lympha Press Mini Press - Program

Sequential:

Sequential programmet fylder manchetternes luftkamre i perifer til central retning. Når alle luftkamre er fyldt med luft, lettes trykket og der er en kort pause, inden inflation starter forfra igen.

Dette program holder trykket i længst tid i de perifere luftkamre. Derfor er det velegnet til personer, der behøver længere tids perifer kompression samt mere intensiv kompression i hele manchetten.

Lympha Press Mini Press anvendes af/til personer som kun har brug for et kompressionsprogram og samme tryk i alle luftkamre i manchetten.

