

QuickGuide Eco Soft™ DVT Personlig læg – og lårmanchet

Bemærk:

Personlige manchetter er til kortsigtet brug med Phlebo Press DVT kompressionspumper på blot **en enkelt patient**.



Anbringelse af kompressionsmanchetten:

1. Placer den åbne manchet med indersiden (uden print) under patientens ben
2. Hullet skal være bag knæhasen.
3. Luk manchettens "flapper" hen over forsiden af benet, og tjek at velcroen sidder godt fast.
4. Der skal være plads til to fingre imellem manchetten og patientens ben.
5. Forbind luftslangerne som er markeret med Eco Soft til Phlebo Press DVT pumpen.
6. Indsæt den modsatte ende i samlestikket på manchetten. Når der høres et KLIK er den korrekt sammensat.
7. Luftslangerne bør ikke ligge under patientens ben. Placer slangerne så unødigt træk undgås.


Bemærk:

I begyndelsen af behandlingen skal der måske flere inflationer til for at fylde manchetten med luft, da den skal fyldes fra en helt tom tilstand.

Efter endt brug:

Afmontering af slanger: Tag fat ved samlestikket, og træk stikket til siden, så åbnes stikket let.

Manchetterne skal bortskaffes efter endt behandling.

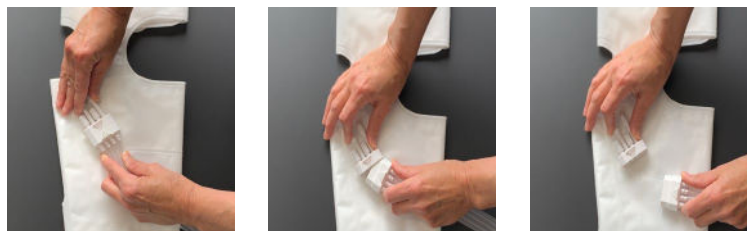

Opfordring:

Obevar slangerne fastgjort til Phlebo Press DVT pumpen mellem anvendelserne; derved undgår man at miste eller forlægge DVT kompressionspumpens slanger.

Version 0520