

Lectro Derm

Kapillærblodprøvetagningspude



Varenr.: 04-007

Forpakning: 10x1st

Transportkarton: 20x10st

EAN kod: 7391133000696

Størrelse: 6x9cm

CE

Indhold:

Natriumacetat, vand.

Ved hudkontakt:

Skyl af med lunkent vand.

Ikke-toksisk, ikke-korroderende.

Før brug: Læs oplysningerne om "Risikofri håndtering."

Også tilgængelig for download på:
www.viroderm.se

L D Kapillærblodprøvetagningspude

En lille og fleksibel varmegpude til at varme fingre/fingerspidser med før en blodprøveudtagning.

Pudes varme skaber en god blodgennemstrømning, der eliminerer behovet for at presse blodet frem. Dette vil gøre blodprøvetagning mere behagelig for patienten, og risikoen for at evt. vævsvæske følger med blodet fjernes.

Sidstnævnte er med til at sikre, at testresultaterne bliver korrekte.

Ekspert anbefaler at benytte varme ved kapillærblodprøvetagning - selv om sommeren.

Varmen har også en beroligende virkning på patienter med nåleskræk.

Puden aktiveres ved at trykke på knappen inde i puden, som derefter genererer op til ca. 54 graders varme. Puden kan "genoplades" op til 100 gange.

Vi anbefaler, at varmegpuden er placeret i vores beskyttende pose (Varenr: Viro 006), da det sikrer, at puden ikke opleves for varm for børn eller andre personer, der ikke selv er i stand til at afgøre, hvordan de reagerer på varmen fra puden.

For yderligere information på dansk kontaktes:

ApodanNordic A/S
Tlf.: 32 97 15 25
Mail: info@apodan.dk
Web: www.apodan.dk

Fremstillet af: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA